

CZ ENZYMAX tekutý (IMS-1222, IMS-1224, IMS-1226)

Tekutý enzymatický čisticí prostředek

NXXXX/0616

Čistý obsah: IMS-1224: Láhev s pumpičkou 0,95 l
IMS-1226: Láhev 3,8 l
IMS-1222: 40 sáčků po 10 ml (koncentrát)

Návod k použití: Před použitím dobře protřepejte. Používejte gumové rukavice a ochranné brýle. Doporučená teplota vody: 32 až 60 °C. Voda: Nejlépe demineralizovaná voda. **Namáčení:** Přidejte 30 ml přípravku Enzymax do 3,8 l vody / 1 sáček (10 ml) vystačí na 3,5 litru vody. Namáchejte 3–5 minut. Důkladně opláchněte. **Namáčení prádla:** Přidejte 60 ml přípravku Enzymax do 3,8 l vody. Oděvy nechejte namáčet 10 minut. Na závěr vyperte běžným způsobem. **Ultrazvukové čištění:** Přidejte 30 ml koncentrátu do 3,8 l vody / 1 sáček (10 ml) vystačí na 3,5 litru vody. Po vyčištění důkladně opláchněte a nechejte uschnout. **Odsávací zařízení:** Přidejte 60 ml přípravku Enzymax do 3,8 l vody. Připojte odsávací hadičku a nechejte systém naplno běžet jednu minutu. Doporučení: Ošetření provádějte dvakrát týdně. Na závěr nástroj vydezinfikujte, důkladně opláchněte, osušte a proveďte sterilizaci.

– Přípravek Enzymax nemíchejte s dezinfekčními prostředky a nepoužívejte v termodezinfektorech. Roztok Enzymax vyměňujte alespoň jednou denně.



DANGER

H318 Způsobuje vážné poškození očí. **H334** Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **P342+P311** Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **Bezpečnostní údaje:** Obsahuje subtilisin, amylázu, alfa - může vyvolat alergické reakce. Prázdné obaly likvidujte v souladu s místními a národními předpisy. **Bezpečnostní list** je k dispozici na vyžádání nebo na webu: www.hu-friedy.eu.

Telefonní číslo pro případ nouze: ZE ZAHRANIČÍ: +49 (0)6132 84463, GBK GmbH (24 hodin denně - 7 dní v týdnu - 365 dní v roce) / Německo: 06132 84463 (24 hodin denně - 7 dní v týdnu - 365 dní v roce).

Hu-Friedy

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
3232 N. Rockwell St.
Chicago IL 60618

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.

Zweigniederlassung Deutschland - Kleines Öschle 8
D-78532 Tuttlingen Tel: 00800 48 37 43 39
www.hu-friedy.eu - info@hu-friedy.eu