



ENZYMAX tekutý (IMS-1229, IMS-1229SP)

NXXXX/0616

Prostředek k předčištění nástrojů k přímému použití

Čistý obsah: IMS-1229: Láhev 709 ml
IMS-1229SP: Lahvička 59,15 ml

Návod k použití:

Nasaďte si rukavice a ochranu zraku.

1. Prostředek pro předčištění nastříkejte po úkonu nebo před čištěním přímo na nástroje.
2. Nástroje rovnoměrně navlhčete.
3. Nechejte nástroje odmočit.
4. Před další manipulací je opláchněte.
5. Proveďte obvyklé kroky čištění.

Prázdne obaly likvidujte v souladu s místními a národními předpisy.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání nebo na webu: www.hu-friedy.eu

Telefonní číslo pro případ nouze: ZE ZAHRANIČÍ: +49 (0)6132 84463, GBK GmbH (24 hodin denně - 7 dní v týdnu - 365 dní v roce) – Německo: 06132 84463 (24 hodin denně - 7 dní v týdnu - 365 dní v roce)



Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
3232 N. Rockwell St.
Chicago IL 60618

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
Zweigniederlassung Deutschland - Kleines Öschle 8
D-78532 Tuttlingen Tel: 00800 48 37 43 39
www.hu-friedy.eu - info@hu-friedy.eu